



ДЭСОН МЕДИ

BELISSIMA

BELISSIMA

PLLA DERMAL FILLER

365мг × 1 флакон (5мл)



Коллагеновый стимулятор PLLA подтвержден Министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов Кореи (MFDS) и FDA в качестве медицинского материала.

Предназначен для лечения выраженных мимических морщин и складок, устранения объёмных дефектов, липоатрофии и коррекции деформаций контура лица.



УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА OLIDIA
ПОЛИ-L-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
(PLLA) ДЕРМАЛЬНЫЙ ФИЛЛЕР

ПОЧЕМУ Belissima?

Естественный объем и долговечность, Инъекционная поли-L-молочная кислота (Belissima) восстанавливает объем за счет стимуляции коллагена в слое кожи. Созданный объем собственным коллагеном сохраняется более 2-х лет.

Для ВАС	Для Пациентов
Удобный	Естественный результат Результат будет проявляться постепенно
Стойкий объем	Стойкий объем
Безопасный Подтверждено корейской MDFS и имеет знак CE. Основной ингредиент PLLA - биоразлагаемый.	Быстрое время восстановления С меньшим временем простоя легко вернуться к нормальной жизни
Стабильное лечение более 20 лет Лечение морщин с помощью PLLA проводится уже более 20 лет	Увеличение объема и восстановление Улучшение морщин за счет ренатурации утраченного коллагена
Экономное решение Belissima + WFA (вода для инъекций) + Лидокаин	Экономный Меньше затрат, чем на другие хирургические методы лечения
Короткое время лечения	Короткое время лечения

Технология производства

Как работает Белиссима?


PLLA (Ploy L-молочная кислота) Основным ингредиентом Belissima является биосовместимый и биоразлагаемый синтетический полимер, который используется для изготовления шовных материалов и других медицинских устройств. Введенный PLLA стимулирует выработку коллагена, постепенно восстанавливаемый объем разглаживает морщины.

Механизм действия




ШАГ 1

Вводят разведенный препарат Белиссима в подкожный слой кожи.

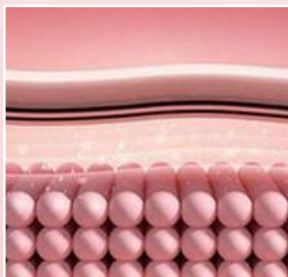

ШАГ 2

Во-первых, уменьшение морщин можно показать с помощью WFI (воды для инъекций) и разбавленной Белиссимы.

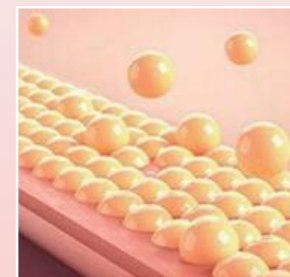


ШАГ 3

Через несколько дней после поглощения воды остались только частицы Belissima.



ШАГ 4

Новые клетки собираются вокруг PLLA и увеличиваются фибробласты.

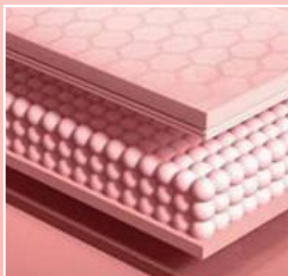

ШАГ 5

Увеличение количества фибробластов стимулирует выработку коллагена и улучшает складки кожи.



ШАГ 6

Генерируемый коллаген сохраняется в течение 2 лет, а частицы Belissima биоразлагаются.

Руководство по процедурам

1. Разбавьте 8мл физиологического раствора (N/S), затем осторожно встряхивайте в течение 1–2 минут;
2. Перед использованием снова слегка встряхните в течение 1–2 минут;
3. Перелейте раствор в шприц Luer-lock объемом 1–3 мл;
4. Для достижения оптимальных результатов оставьте его при комнатной температуре на 3–72 часа;
5. Один флакон (8мл) используется с одной стороны для протокола по всему лицу.




- На указанные области лица наносится местная анестезия.
- Игла 23 калибра служит в качестве проводника для создания точки входа.
- Для процедуры используется нетравматичная тупая канюль (23-25G, 50-70 мм).
- При необходимости может быть выполнена блокада подглазничного и скулового лицевого нерва с помощью 1% лидокаина и 1:100 000 адреналина.
- Рекомендуется вводить в среднем 2-3 флакона в лицо.
- Места инъекций и дозировка определяются размером лица, зонами потери объема и степенью тяжести.
- При необходимости можно включить дополнительные процедуры для лба, щек и линии подбородка.
- Процедуру рекомендуется проводить три раза с интервалом от 4 до 6 недель.

BELISSIMA – превосходный стимулятор коллагена PLLA

Таким образом, по сравнению с PDLA MS и PDLLA MS, PLLA MS представляет собой материал для наполнителя кожи с более низкой стоимостью, меньшей побочной реакцией, лучшим эффектом наполнения и превосходным эффектом стимуляции коллагена. Кроме того, PLLA MS может содержать коллаген и другие вещества, полезные для восстановления кожи и регенерации коллагена, которые могут медленно высвобождаться в результате разложения PLLA для достижения лучшего косметического эффекта.

PLLA MS — ценный и превосходный дермальный наполнитель.

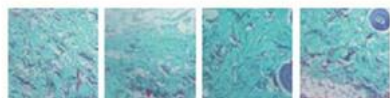



Управление PDLA MS PLLA MS PDLLA MS
Коллагеновые волокна мышцы и хрящи: Синий.



Управление PDLA MS PLLA MS PDLLA MS
Коллаген типа I: Красный или Желтый
Коллаген типа III: Зеленый

Исторический анализ регенерации коллагена. (А) Окрашивание по Массону и (Б) Окрашивание Пикросириусом в красный цвет кожи в месте инъекции трех видов микросфер PLA на 30-й день. Коллагеновые волокна I красного или желтого цвета, коллагеновые волокна типа III — зеленого цвета.

Безопасный стимулятор коллагена PLLA

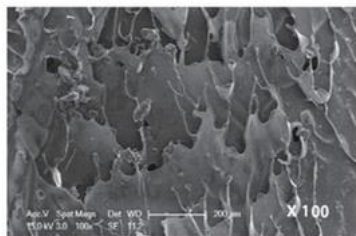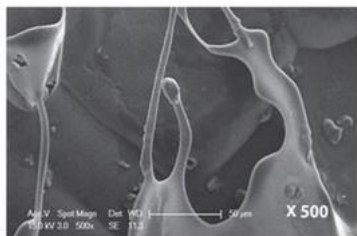

Содержание коллагена I типа в группе PLLA по-прежнему составляло 84,7%, а коллагена III типа — 15,1%. Общее количество коллагена I и III типа было в 1,4 раза больше, чем коллаген в группе PDLA и в 1,1 раза больше, чем коллаген в группе PDLLA. (Рис. 4C). Это показало, что PLLA MS оказывает наиболее очевидный эффект на стимуляцию регенерации коллагена, и он действительно подходит для использования в качестве дермального наполнителя по сравнению с двумя другими хиральностями.



Полуколичественный анализ коллагеновых волокон типа I и типа III. Данные представлены как среднее стандартное отклонение. n=3; *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001, ns: незначительный

Свяжитесь с нами

«ДЭСОН МЕДИ»

Оптовая компания по поставке
инъекционных косметологических
препаратов в России



ДЭСОН МЕДИ

КОНТАКТЫ:

АДРЕС: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 65А

ТЕЛЕФОН: +7-909-824-84-84

E-MAIL: info@k-aesthetic.ru

ВЕБ-САЙТ: kosmetologiya-opt.ru





POWER HEALER
MULTIFUNCTIONAL SKIN BOOSTER



RAVENNA
PLLA COLLAGEN BOOSTER



CLAIREYES
FILLER FOR EYES



BELISSIMA
PLLA DERMAL FILLER



V-UP BODY
BODY FILLER



MIRATOX
BOTULINUM TOXIN TYPE A



RAVELLO
PLLA FILLER



OASIS REPAIR
PN POLYNUCLEOTIDE



EXOBOOM
EXOSONES FOR SKIN & HAIR



MELLINE
AMPOULE SOLUTION FOR FACE & BODY



SMILE FILL
DERMAL FILLER



TRUE BELLA
SKIN BOOSTER



EVERLIFTING
THREADS FOR REJUVENATION AND FACELIFT



PLATINUM PTT PRIMO

PLATINUM,
the perfect match for lasers.

Nano particles penetrate sebaceous glands,
causing localized thermal damage



ДЭСОН МЕДИ

