



ДЭСОН МЕДИ

OASIS REPAIR

OASIS REPAIR

PN ФИЛЛЕР С ПОЛИНУКЛИАТИДАМИ

2мл × 2 шприца

20мг PN (полинуклиатидов) в 1мл • 40мг PN в 1 шприце

Высококонцентрированный бустер для кожи, полностью состоящий из высококачественных французских полинуклеотидов (PN) в концентрации 20 мг/мл. Этот процесс осветляет кожу и стимулирует выработку коллагена и фибробластов, что приводит к улучшению общего качества кожи и уменьшению морщин.

Бережный производственный процесс сохраняет двухцепочечную структуру ДНК, обеспечивая высокий уровень чистоты наших полинуклеотидов (PN).


Натуральный и безопасный материал, получаемый в качестве побочного продукта из лосося



Эффективность полинуклеотидов

Улучшение качества кожи

Полинуклеотиды – это универсальный бустер для кожи, который не только способствует регенерации и росту клеток, но и представляет собой комплексное решение для ухода за кожей. Они повышают тонус и эластичность кожи, уменьшают мелкие морщины и устраняют сухость. Кроме того, данный препарат способствует общему омоложению кожи путем стимуляции выработки коллагена и эластина и улучшения увлажненности.

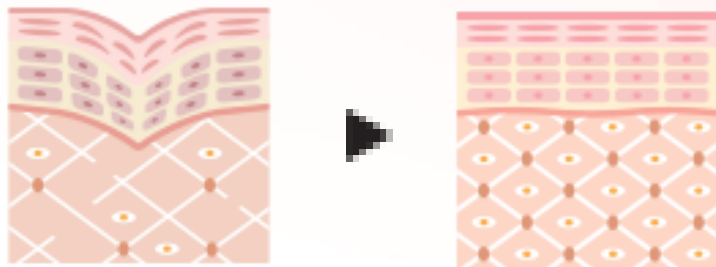

Эффект регенерации

Полинуклеотиды (PN) / полидезоксирибонуклеотиды (PDRN), известные своим значительным влиянием на регенерацию тканей и снятие воспаления, используют для лечения и улучшения различных дегенеративных состояний, связанных со старением. Данный препарат также применяют в областях, требующих регенерации, таких как заживление ран кожи, восстановление поврежденных или дефектных тканей, а также используют для облегчения восстановления роговицы и конъюнктивы глаза.

Свойства PN/PDRN по регенерации тканей были впервые обнаружены в Италии до 2000-х годов при использовании экстракта форели. Позже, с развитием методов производства экстракта из лосося и появлением достижений в области технологий, эти соединения привлекли значительное внимание со стороны рынка и их области применения были расширены.

PN/PDRN стимулируют высвобождение различных факторов роста, поддерживают синтез поврежденной ДНК и способствует правильной регенерации клеток. Препарат широко доступен на мировых рынках, включая европейские страны.

Превосходное качество сырья

Высококачественное сырье из Франции, произведенное на предприятии, сертифицированном в соответствии с правилами Надлежащей производственной практики, и проверенное Национальным агентством по безопасности лекарственных средств Франции.

Щадящий процесс производства позволяет сохранить двухцепочечную структуру ДНК, и гарантирует нашим полинуклеотидам (PN) высокий уровень чистоты.

Натуральный и безопасный материал, который представляет собой побочный продукт переработки лосося.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (станд. метод Евр. фарм.)	СПЕЦИФИКАЦИИ (TDS PN APN1, Корея, версия 6.0)	РЕЗУЛЬТАТЫ
<u>Научные данные</u> Рибонуклеиновая кислота Элементные примеси – Класс 1 (2.2.58, ИСП-МС) – Мышьяк – Кадмий – Ртуть – Медь – Никель	$\leq 3,5 \%$ Спецификация в соответствии с МКГ Q3D Элементные примеси, сентябрь 2015 года $\leq 1,5$ м.д. $\leq 0,2$ м.д. $\leq 0,3$ м.д. $\leq 0,5$ м.д. ≤ 80 м.д. (вариант 2a)	СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
<u>Тесты</u> Белки (2.2.25.) Бактериальные эндотоксины (2.6.14D) Микробиологическая чистота Число жизнеспособных аэробных микроорганизмов (2.6.12.) – Бактерии (Общее число аэробных микроорганизмов – ОЧАМ) – Дрожжевые и плесневые грибки (Общее число дрожжевых и плесневых грибов – ОЧДПГ)	$\leq 1,0 \%$ $< 0,5$ МЕ/мг ≤ 100 КОЕ/г ≤ 10 КОЕ/г	СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Описание процедуры

Область инъекции

- **Лицо**
- **Мелкие морщины, гусиные лапки и морщины вокруг рта**
- **Шея и руки**

Первоначально рекомендуется провести 3–4 процедуры с использованием 2 мл препарата с интервалом в 2–3 или 3–4 недели. Обычно на одну процедуру для лица используют 2 мл препарата. Объем можно скорректировать в зависимости от состояния пациента и решения врача.

Процедура и последующий уход

Препарат вводят непосредственно в слой дермы с использованием иглы 30 калибра.

При использовании инжектора инъекцию вводят на глубину около 0,5 мм, регулируя ее в зависимости от переносимости боли пациентом, толщины кожи и утечки раствора.

При использовании только местной анестезии вместо седативной анестезии более поверхностная инъекция может быть предпочтительнее.

Корректировки можно вносить в зависимости от

зоны проведения процедуры, состояния пациента и результатов оценки, проведенной врачом.


Меры предосторожности

Инъекции полинуклеотидов могут вызвать некоторый дискомфорт, поэтому лицам, чувствительным к боли, может быть лучше проводить процедуру под анестезией.

Небольшие уплотнения или припухлости могут сохраняться в течение нескольких дней: это зависит от толщины кожи.

Временное покраснение или отек также являются обычными явлениями, которые должны исчезнуть в течение нескольких дней, в то время как синяки в месте введения иглы могут сохраняться в течение недели.

Для снижения риска воспаления не следует делать массаж и нужно соблюдать особую осторожность в течение нескольких дней. При возникновении каких-либо аллергических реакций или постоянного дискомфорта следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

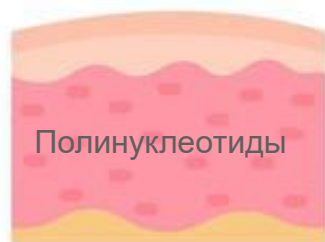







Руководство по проведению процедуры:

Шаг 1: Медицинская процедура
Медицинский работник вводит инъекции полинуклеотидов непосредственно внутрь кожи для временного устранения морщин на лице.

Шаг 2: Система микроигольной терапии
Для улучшения проникновения Косметического полидезоксирибонуклеотида в эпидермальный слой используют мезороллер (0,2–0,25 мм).

Шаг 3: Ручной массаж
В течение 3 дней после процедуры следует делать легкий ручной массаж лица с использованием косметики на основе косметического полидезоксирибонуклеотида и органических ингредиентов для укрепления кожного барьера.

До и после применения препарата OASIS REPAIR

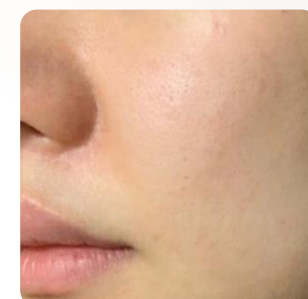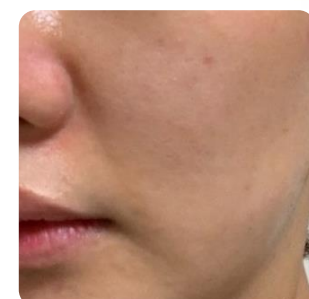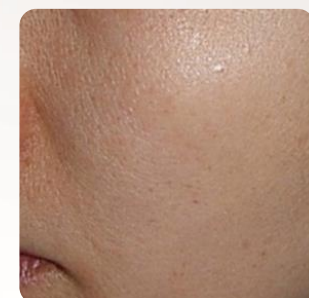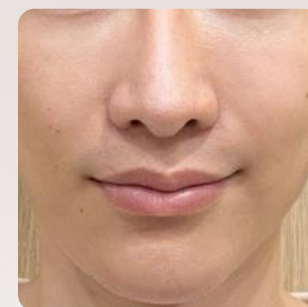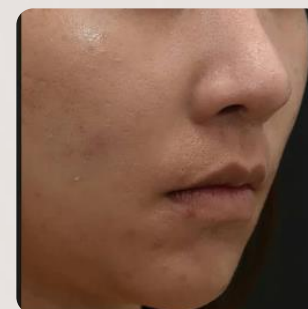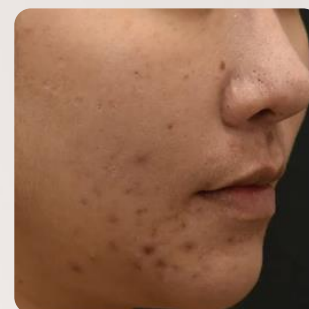

Свяжитесь с нами

«ДЭСОН МЕДИ»

Оптовая компания по поставке
инъекционных косметологических
препаратов в России



ДЭСОН МЕДИ

КОНТАКТЫ:

АДРЕС: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 65А

ТЕЛЕФОН: +7-909-824-84-84

E-MAIL: info@k-aesthetic.ru

ВЕБ-САЙТ: kosmetologiya-opt.ru





POWER HEALER
MULTIFUNCTIONAL SKIN BOOSTER



RAVENNA
PDLA COLLAGEN BOOSTER



CLAIREYES
FILLER FOR EYES



BELISSIMA
PLLA DERMAL FILLER



V-UP BODY
BODY FILLER



MIRATOX
BOTULINUM TOXIN TYPE A



RAVELLO
PLLA FILLER



OASIS REPAIR
PN POLYNUCLEOTIDE



EXOBOOM
EXOSONES FOR SKIN & HAIR



MELLINE
AMPOULE SOLUTION FOR FACE & BODY



SMILE FILL
DERMAL FILLER



TRUE BELLA
SKIN BOOSTER



EVERLIFTING
THREADS FOR REJUVENATION AND FACELIFT



PLATINUM PTT PRIMO

PLATINUM,
the perfect match for lasers.

Nano particles penetrate sebaceous glands,
causing localized thermal damage



ДЭСОН МЕДИ