



V-UP BODY



#### ФИЛЛЕР ДЛЯ ТЕЛА 60мл×1флакон




V-UP BODY обладает большой ёмкостью в 60мл и уникальной системой сшивания BDDE.

V-UP BODY Спецификация [60мл]	
Концентрация ГК (мг/мл)	24
Показания	Для контуринга тела
Модуль упругости (G')	280
Модуль потери (G")	15.1
Фазовый угол	1.36
Усилие при инъекции (N) (27G UTW)	14.1 ± 0.5
Лидокаин	0.30%


24мг/мл – концентрация гиалуроновой кислоты

#### Технология изготовления

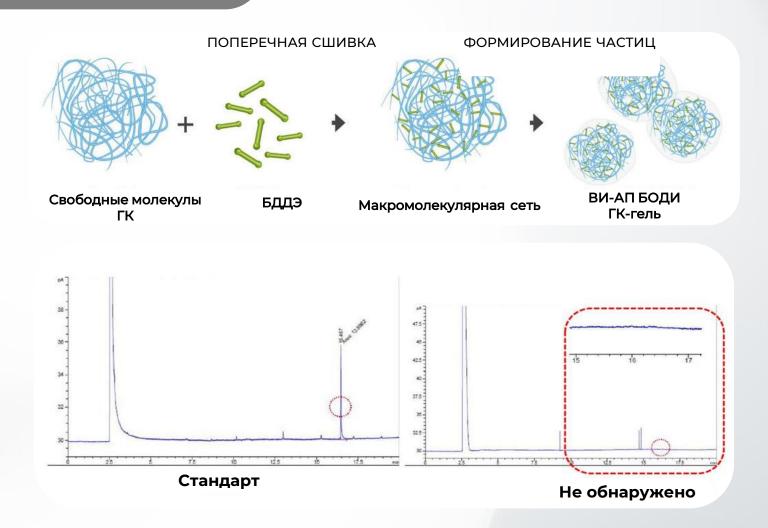

Минимизируют количество БДДЭ, используемого для сшивки, чтобы минимизировать воздействие БДДЭ, которое может возникнуть при деградации ГК-геля внутри организма.

#### Технология производства

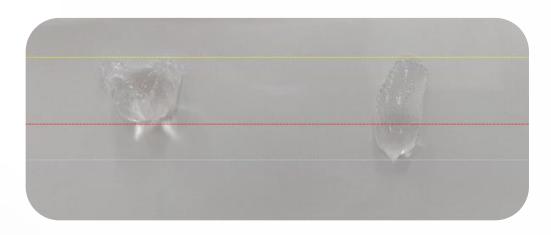

Проводят проверку, оставляя 0,3 мл каждого препарата на поверхности под углом около 80° на 10 минут. Капля V-UP BODY сохраняет свою форму. Подтверждено, что данный препарат имеет более высокую адгезию по сравнению с БДДЭ.


Тонкодисперсные частицы препарата V-UP BODY разделены между собой

Новая частица присоединяется к тонкодисперсным частицам

Еще одна частица присоединяется к новым частицам

**V-UP BODY** 



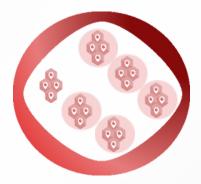





## Восстановите свою кожу с V-UP BODY



#### Протокол применения



- 1. Препарат извлекают с использованием иглы или канюли 16~18 калибра.
- 2. Прокалывают пробку флакона иглой, переворачивают флакон и шприцом извлекают его содержимое.
- 3. Добавляют физиологический раствор, перемешивают и извлекают (только в количестве 0-10 мл, необходимом для достижения желаемого эффекта).

# Свяжитесь с нами

# «ДЭСОН МЕДИ»

Оптовая компания по поставке инъекционных косметологических препаратов в России



### контакты:

АДРЕС: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 65А

ТЕЛЕФОН: +7-909-824-84-84 E-MAIL: info@k-aesthetic.ru

ВЕБ-САЙТ: kosmetologiya-opt.ru





POWER HEALER



RAVENNA



CLAIREYES



BELISSIMA



V-UP BODY



MIRATOX



RAVELLO



OASIS REPAIR



EXOBOOM



MELLINE



SMILE FILL



TRUE BELLA



EVERLIFTING



ДЭСОН МЕДИ

